


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### CÉSARClip®

- **Mesurer la hauteur monture** (mesurer de haut en bas, cerclage compris).
- **Mesurer la largeur monture** (même principe que la hauteur monture en fonction de l'épaisseur du cerclage nasal et temporal).
- **Positionner vos trous de perçage** de la façon suivante :
  - Le trou le plus temporal se situe à **40 mm** en partant du milieu du nez .
  - Le trou nasal se situe à **34 mm** en partant du milieu du nez, soit 6 mm de différence entre les 2 trous de perçage.
  - Les 2 trous se situent **2 mm** en dessous de votre hauteur monture.
  - Le diamètre de perçage est de 1,4 mm.
- **Choisir la taille de votre mécanisme** en fonction de la Hauteur monture mesurée :
  - Prendre une taille Médium (M) jusqu'à 41 mm et une taille Large (L) à partir de 42 mm et plus.
- **Sertir le verre** avec la pince fournie dans votre kit.

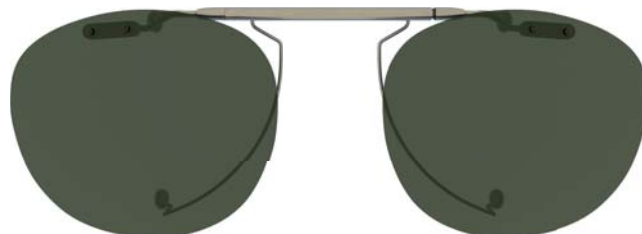

Votre **CÉSARClip®** est prêt !

