

CLIPAND GO READER


FICHE TECHNIQUE DE PRISE DE MESURES ET DE MONTAGE

Le verre bifocal doit couvrir la totalité de la monture.

1. Prise de mesures

1

Mesurer la distance du bord inférieur de la paupière inférieure au bas de la lunette pour le CLIP&GO READER.

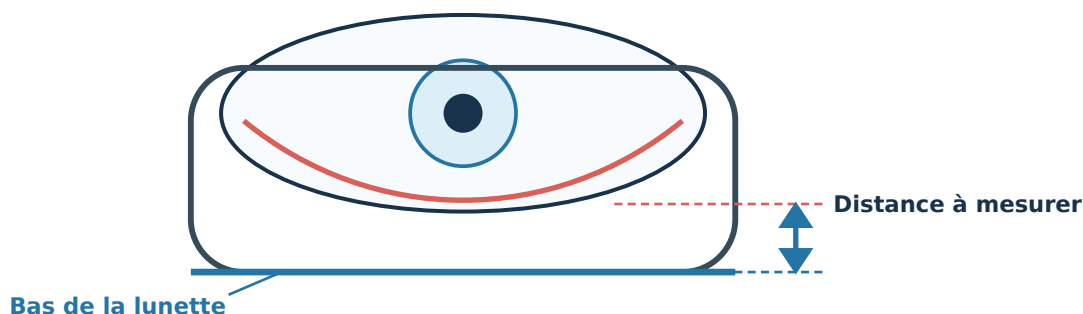

2

Mesurer la hauteur de la lunette : de la tangente supérieure à la tangente inférieure, cerclage compris.

3. Tailler et percer les verres à la forme de la monture

Positionner la hauteur de la pastille de lecture par rapport au bas de la monture.

Repère	Position
Trou temporal	40 mm à partir du milieu du nez
Trou nasal	34 mm à partir du milieu du nez
Entraxe	6 mm entre les deux trous
Position verticale	Les deux trous sont placés sur la même ligne, 2 mm en dessous de la hauteur de la monture
Diamètre	Perçage Ø 1,4 mm

4. Sertissage

4

Sertir le verre à l'aide de la pince fournie dans votre kit.

CLIP&GO READER - 100 % SUR MESURE

